



AIRCAST®

AIRSELECT™ ELITE

VENAFLOW® ELITE

BRUKSANVISNING

PATIENT




AirSelect™ Elite


VenaFlow® Elite




VENAFLOW® ELITE – FUNKTION OCH DISPLAY

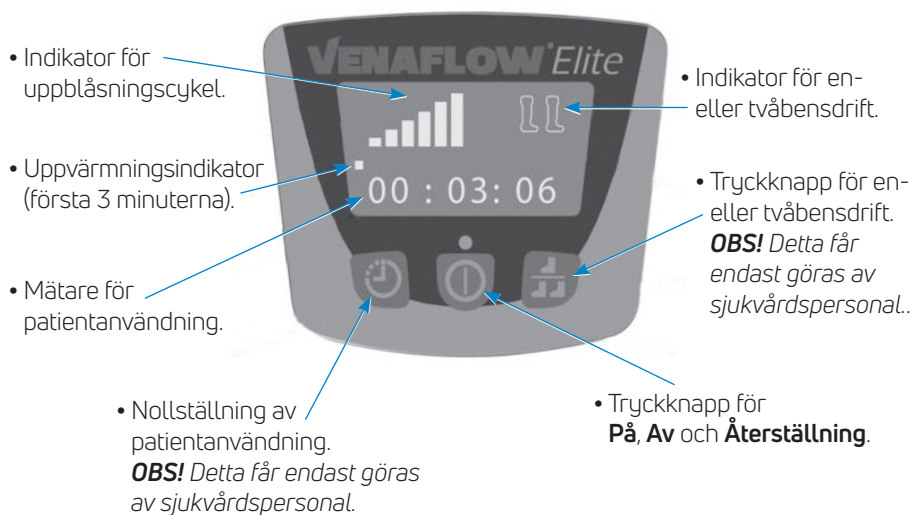


VENAFLOW® ELITE – FÖRBEREDELSE AV PUMPSETET

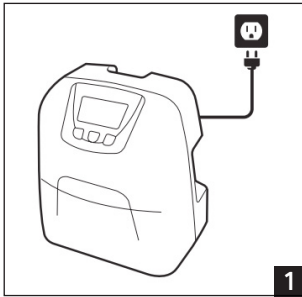

1. Anslut till eluttaget.
2. Koppla in slangarna på sidan av pumpen som bilden visar. Se till att kopplingarna "klickar i" och låser ordentligt. **OBS!** Slangarna tillhör pumpen och skall återlämnas tillsammans med pumpen efter avslutad behandling.
3. Anslut den andra änden av slangarna till respektive manschett. Se till att kopplingarna "klickar i" och låser ordentligt. Anslut alltid båda manschetterna för att slippa larm och läckage.

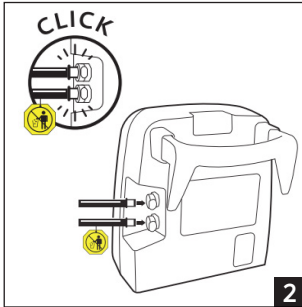


OBS! Kontrollera att pumpen fortfarande är **avstängd** innan du lindar manschetterna runt benet.

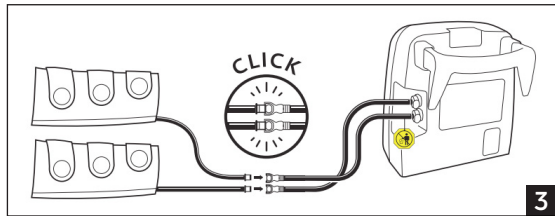

VENAFLOW® ELITE – HANDHAVANDE AV VADMANSCHETTEN

- Linda manschetten runt vaden och fäst den med kardborrebandet.
- Se till att slangarna leder ut nedtill, mot foten. Linda manschetten stadigt men inte hårt.
- Luftfickan sitter oftast på baksidan men det går bra att placera den på den sida som känns mest bekväm.
- Gå inte omkring med manschetterna på eftersom du riskerar att snubbla.

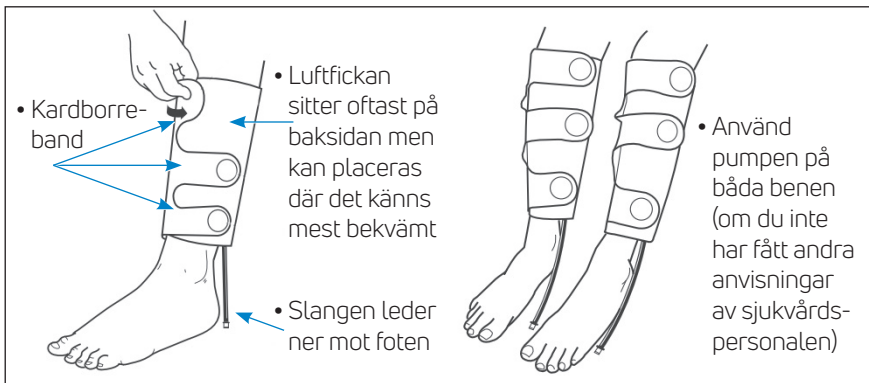

VENAFLOW® ELITE – FELSÖKNING

Vid problem med pumpen


Fungerar inte – inga gröna lampor lyser.	Kontrollera att strömmen är ansluten. Kontrollera att strömssladden inte är skadad. Kontrollera att pumpen inte har utsatts för stötar eller andra skador.
Fungerar – men inga gröna lampor lyser.	Pumpen har blivit skadad och lysdioderna har lossnat – returnera till sjukhuset.
Benlarm är aktiverat.	Kontrollera hur många ben som är anslutna. Pumpen är förinställd på två ben om du inte trycker på knappen “En- eller tvåbensdrift” .

Vid obehag för patienten


Huden visar tecken på rodnad.	Daglig undersökning av huden krävs. Flytta manschetten och slangarna för att lätta på trycket.
Pumpen låter för mycket, svårt att slappna av.	Prova att flytta pumpen till ett mjukare underlag (t.ex en kudde).
Manschetten sitter för hårt.	Kontrollera storleken och byt till en större om det behövs. Kontrollera att det finns plats för två fingrar mellan huden och manschetten.

VENAFLOW® ELITE – VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR


Vristen är öm där slangarna sitter.	Manschetten kanske sitter för hårt eller så trycker slangens mot vristen. Flytta manschetten och slangens för att lindra ömmandet.
Kan jag gå omkring med pumpen medan den är igång?	Pumpen är inte bärbar. Om du går omkring med pumpen finns risk att snubbla och ramla.
Kan jag stoppa IPC-behandlingen och starta om senare?	Du måste se till att pumpen är igång så länge som möjligt för att minska risken för DVT. Den kan stängas av om patienten går omkring, men den bör slås på igen när patienten är stilla.
Finns det någon latex i komponenterna?	Nej, varken slangarna eller manschetterna innehåller någon latex och kan därför placeras mot huden.
Kan jag använda en förlängningssladd?	Strömssladden har en längd på 4,3m. Om det behövs kan en förlängningssladd användas, dock med försiktighet.
Var ska pumpen vara placerad när den används?	Pumpen måste vara ansluten till ett eluttag. Den ska placeras på ett stabilt underlag eller fästas med kroken.
Manschettens passform/komfort.	Om manschetten känns för stram ska du kontrollera att det finns plats för ungefär två fingrar mellan manschetten och benet. Om vadens omkrets är större än 48 cm behöver du en större storlek.
Ett eller två ben samt slangar.	Det är bättre att använda pumpen på båda sidor än bara på ena sidan. DVT kan uppstå i båda benen vid stillasittande. IPC-behandling för att frigöra NO i blodet minskar effektivt risken för DVT i båda benen.
Slangar.	Slangarna kan användas flera gånger. Se till att fästa dem vid pumpen med hjälp av kroken. Var noga med att inte linda slangarna runt patientens ben. Gå inte omkring med slangarna fästa vid manschetterna.
Jag har spillt något på manschetterna, slangarna eller pumpen, vad gör jag då?	Apparaten, slangarna och manschetterna kan torkas av med en mild tvållösning eller desinficerande våtservetter. Sänk inte ner någon av delarna i vätska. Manschetterna måste lufttorka.
Kan jag hänga den på en stolsrygg eller annan möbel?	Ja, så länge du trycker på sängkrokens spärrknapp och sedan spärrar den igen så att den sitter säkert kan du hänga den på de flesta stolar och liknande.

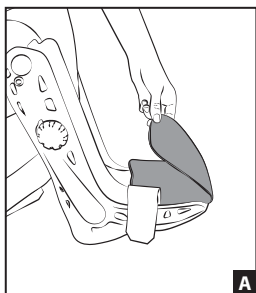

A

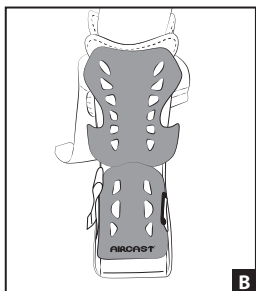

B

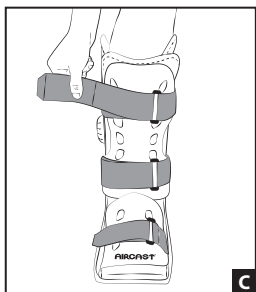

C

AIRSELECT™ ELITE – HANDHAVANDE

Förbered ortosen

- Ta loss remmarna, ta bort frontpanelen och öppna tåskyddet och fotflikarna.

Sätt på ortosen


- Börja med att ta på socknan som följer med ortosen.
- Sitt ned och placera foten i ortosen med hälen mot den bakre delen av ortosen. Lagg fotflikarna över foten och tåskyddet runt tårna (fig. A).
- *Sätt tillbaka frontpanelen:* justera frontpanelen så att aircast-logotypen är placerad över tårna och fotskenan är placerad inuti ortosen. Den övre delen av skenan ska fästas utanpå ortosen (fig. B).
- Fäst remmarna nedifrån och upp (fig. C). Dra åt remmarna så att de sitter åt ordentligt och bekvämt.

Justera trycket i luftcellerna – luftcellerna i ELITE-ortosen är inte fyllda från början

- Börja fylla på med luft på den skadade sidan först. Pumpa tills benet får kontakt med luftcellen. Vrid *ratten*, som finns på ortosens högra sida, till lämpligt nummer (fig. D). Nummer 1 fyller luftcellerna på den högra sidan, nummer 2 fyller luftcellerna på den vänstra sidan och nummer 3 fyller den bakre luftcellen.


OBS!

- För att pumpa upp luftcellerna måste det lilla centrerade hålet på den stora luftpumpen täckas över med ett finger. Detta är en säkerhetsåtgärd som motverkar ofrivillig pumpning av luftcellerna.
- Tryck ned och släpp den **stora** luftpumpen högst upp på ortosens högra sida för att fylla luftcellen (fig. F). Fyll med luft tills luftcellen sitter åt ordentligt.
- Vrid *ratten* till lämpligt nummer och tryck ned och släpp den stora luftpumpen för att fylla de övriga luftcellerna. Fyll med luft tills luftcellen sitter åt ordentligt.
- Om du fyller på för mycket luft kan du tömma luftcellerna.

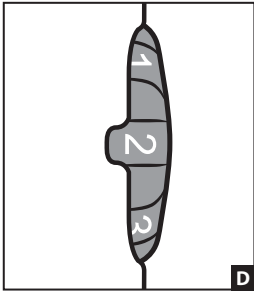


Tömma luftceller

- Vrid *ratten*, som finns på ortosens högra sida, till lämpligt nummer (fig. D) för att tömma luftcellerna.
- Tryck och håll ned den **lilla** tömningsknappen på översidan på högra sidan av ortosen (fig. G).
- Töm tills trycket känns bekvämt.

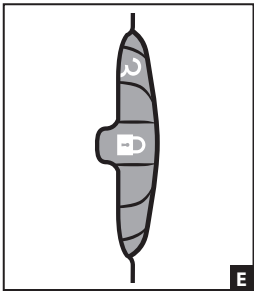


Låst läge

- När du har fyllt klart luftcellerna så vrider du ratten till det låsta läget indikerat med ett hänglås (fig E). I detta läget kan du varken fylla eller tömma luftcellerna.

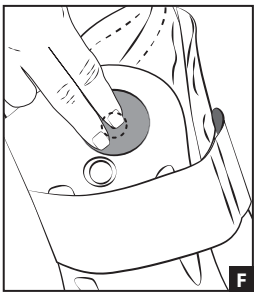

Tänk på att...

- ...öppna upp ortosen och lufta foten flera gånger om dagen. Du får **INTE** belasta på foten när ortosen har avlägsnats.
- ...tömma luftcellerna *innan du tar av ortosen* så att den sitter ordentligt när du tar på den nästa gång.
- ...ett högre tryck ger mer stöd när du går och ett lägre tryck är bekvämare när du sitter eller ligger ned. Du kan även justera trycket genom att dra åt eller lossa remmarna.

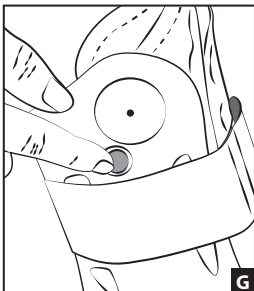

AIRSELECT™ ELITE – ÖVRIG INFORMATION

Varningar och försiktighetsåtgärder

Blås inte upp luftcellerna för mycket. Om luftcellerna inte är uppblåsta korrekt kan det orsaka markant hudirritation, särskilt hos personer med diabetesneuropati (skador på nervsystemet till följd av diabetes). Undersök huden ofta och leta efter varma partier och hudirritationer. Om du ser hudförändringar eller känner obehag ska du minska luftrycket i luftcellerna. Använd inte denna produkt om du inte har någon känsel på grund av postoperativ bedövning, nerv- eller hudskador eller andra tillstånd. Var försiktig när du går på hala eller våta ytor så att du inte skadar dig.

Rengöring

Skumfodret kan tvättas för hand i 30 °c med ett mildt tvättmedel och **lufttorkas**. Får ej läggas i torktumlare eller annan värmekälla för att torka.

Latex

Denna Aircast-produkt är fri från Latex.

VENAFLOW® ELITE – LJUDLARM OCH VISUELLA LARM

När ett fel upptäcks varnar pumpen användaren på följande sätt:

- Röda lampor blinkar på ovansidan av pumpen
- Felet anges på LED-skärmen med engelsk text och ikoner
- Ett ljudlarm hörs



- Slangar – vikta eller inte ordentligt anslutna, läckage. Ljudet hörs efter 4–6 min.



- En- eller tvåbens-drift – beroende på anslutna manschetter. Ljudet hörs efter 4 min.



- Patientanvändning – om manschetten inte är ansluten. Ljudet hörs efter 15 min.



- Beställ service om någon av de kritiska komponenterna inte fungerar, t.ex. högt/lågt tryck.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson/Avdelning:

Telefon:

Email: