



# Kalibrering

- Logga in med användarnamn och lösenord
- På hemskärmen ser du status för kalibrering nere till höger (1). Det finns en snabb daglig funktionstest som kontrollerar att maskinen kan dra in luft och en längre månadskalibrering som ställer in koldioxidnivåerna.
- Tryck på "Routine" från hemskärmen (2)
- Välj om du vill utföra daglig funktionskontroll eller månadskalibrering (3)
- Följ instruktionerna på skärmen. Använd de större påsarna med endast en öppning (4). **Observera att dessa kalibreringspåsar återanvänds och att munstycket kan bytas ut vid behov.**
- För daglig funktionskontroll behöver du bara andas direkt in i påsen. För månadskalibreringen behövs luft med mycket koldioxid och du behöver hålla andan först.
- Sätt påsen på plats nr 1 på maskinen och klicka vidare för att starta kalibreringen (5)

4

